




הוראות שימוש לעזרי אחיזה כפפה לאחיזת חפצים קטנים

אביזר זה מורכב משני חלקים - כפפה ופד לכף-היד (ראה ציור). האביזר מאפשר אחיזה בחפצים קטנים, והחלפה בקלות בין פדים מוכנים לשימוש עם חפצים שונים, כגון בחדר האמבטיה, כשעוסקים באומנות או אוחזים בציוד משרדי.

הכפפה מגיעה מהודקת ומחובר אליה פד אחיזה, באופן שבו יראה האביזר בזמן השימוש.

לשימוש בעזרים, יש לקרוא את ההנחיות הבאות, ולהיעזר בתמונות התואמות

לבישת הכפפה

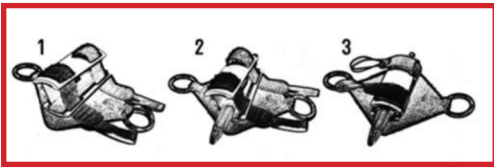

• פתח את רצועת הסקוטש.

• הלבש את הכפפה על היד, והכנס את האגודל דרך הפתח.

• בעזרת הטבעת, הדק את רצועת שורש כף-היד וסגור עם הסקוטש.

• לאחר מכן, לפף את הרצועה סביב החלק העליון של כף-היד.

• הדבק את פד האחיזה על הסקוטש שעל כף-היד. תוכל למקם את פד האחיזה בכל זווית שתרצה.

מיקום פד האחיזה

• פתח את רצועות הסקוטש שעל החלקים הפלסטיים (במידת הצורך, תוך שימוש בלולאות הסרט).

• הפרד בין החלקים הפלסטיים.

• הכנס בין המהדקים הפלסטיים חפץ שבו תרצה לאחוז.

• משוך את הרצועות, תוך שימוש בלולאות הסרט, והדק את הסקוטש.

• כאשר משתמשים במגוון חפצים ובפדים שונים, יש לחזור על פעולות אלה למיקום כל חפץ.

אמצעי זהירות

אם אינך בטוח שעזרים אלו מתאימים לך, התייעץ עם רופא, פזיותרפיסט או מרפא בעיסוק לפני השימוש.

יש תמיד להיצמד להוראות עלון זה, כאשר משתמשים בעזרים אלה.

• כפפת האחיזה אינה מיועדת לאחיזת חפצים כבדים. חפצים כבדים עלולים לפגוע במוצר או במשתמש.

• אין להשתמש בכפפה לאחיזה בחפצים חדים, במידה וסובלים מהתעלפויות/אובדן הכרה.

• אין להשתמש בעזרים כדי לאחוז בחפצים חמים או בקרבת להבה פתוחה.

• יש להיזהר במידה ומשתמשים בכפפה לאחיזת חפצים חדים, כגון סכיני גילוח או סכין חיתוך.

• אין להשתמש בעזרים במידה והם פגומים.

